

Wortkachel hinzufügen

Folgen Sie den Schritten für „Wortkachel hinzufügen“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Bearbeitungsmodus aktivieren

Öffnen Sie die Einstellungen über das Symbol oben rechts, aktivieren Sie den **Bearbeitungsmodus** und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

2

Eine Wortkachel hinzufügen

Klicken Sie unten auf **Kachel hinzufügen** und wählen Sie die Option, eine Wortkachel hinzuzufügen (anstelle einer Kategorie).

3

Den Kachelnamen eingeben

Geben Sie den Namen für Ihre neue Kachel ein (z. B. „Banane“) und bestätigen Sie ihn. Wählen Sie, ob Sie ein Foto aufnehmen oder eines aus Ihrer Galerie auswählen möchten.

4

Foto und Position festlegen

Schneiden Sie das Foto bei Bedarf zu, wählen Sie die gewünschte Position für die neue Kachel und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Speichern und die Kachel verwenden

Die App speichert die Kachel automatisch. Sobald die Kachel geladen ist, tippen Sie darauf, um sie aussprechen zu lassen.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Ich zeige Ihnen, wie Sie eine Wortkachel in der App hinzufügen.

Gehen Sie zunächst zu den Einstellungen, indem Sie auf das Symbol oben rechts drücken, und aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus. Kehren Sie dann zum Startbildschirm zurück.

Jetzt sehen Sie unten eine Schaltfläche "Kachel hinzufügen" erscheinen. Drücken Sie darauf und wählen Sie die Option, eine Wortkachel hinzuzufügen (anstelle einer Kategorie).

Geben Sie den Namen der Kachel ein, die Sie erstellen möchten - in diesem Beispiel "Banane" - und bestätigen Sie den Namen. Sie haben nun die Wahl, ein Foto aufzunehmen oder ein vorhandenes Foto aus Ihrer Galerie auszuwählen.

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen oder ausgewählt haben, können Sie es bei Bedarf noch zuschneiden. Wählen Sie dann die gewünschte Position für Ihre neue Kachel und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Die App speichert nun alles und sobald die neue Kachel geladen ist, können Sie sie verwenden und aussprechen lassen. So einfach ist es, eine persönliche Wortkachel zur App hinzuzufügen!