

Eigene Sprache einrichten

Folgen Sie den Schritten für „Eigene Sprache einrichten“ in Express Me.

Sehen Sie sich das Video an, folgen Sie den Schritten oder öffnen Sie das vollständige Transkript als Textversion der Anleitung.



Scannen, um das Video anzusehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1

Bearbeitungsmodus starten

Starten Sie den Bearbeitungsmodus, indem Sie auf **Bearbeitung starten** klicken.

2

Das Kachelmenü öffnen

Klicken Sie auf die drei Punkte der Kachel, die Sie ändern möchten (z. B. „Hallo“), und wählen Sie **Eigene Sprache aufnehmen**.

3

Die Audioaufnahme erstellen

Klicken Sie auf die Aufnahmetaste, sprechen Sie das Wort oder den Satz und stoppen Sie die Aufnahme.

4

Die Aufnahme anhören und zuschneiden

Hören Sie sich die Aufnahme an und schneiden Sie sie bei Bedarf zu.

Bestätigen und speichern

Klicken Sie auf **Aufnahme bestätigen** und speichern Sie die Aufnahme anschließend oben oder verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

Vollständiges Transkript

▼ Vollständiges Videotranskript lesen

Hallo zusammen, ich bin Rick von ExpressMe.

Ich zeige euch, wie ihr eure eigene Sprache aufnehmen könnt, damit die App sie für euch aussprechen kann.

Wenn wir zum Beispiel hier auf Hallo klicken, hören wir Folgendes. Hallo. Aber daraus möchte ich gerne meine eigene Stimme machen.

Nun, dann gehe ich in den Bearbeitungsmodus. Durch Klicken auf Bearbeitung starten können wir auf die drei Punkte von Hallo klicken. Und dann sehen wir, hey, eigene Sprache aufnehmen.

Wenn ich dann darauf klicke, bekomme ich dieses Pop-up. Und dann können wir ganz einfach mit der Aufnahme beginnen. Das mache ich jetzt. Hallo.

Dann stoppe ich die Aufnahme und können wir sie uns anhören. Hallo. Nun, dann können wir sie eventuell noch etwas zuschneiden, damit es besser klingt. Hallo. Nun, das klingt perfekt.

Dann klicken wir auf Aufnahme bestätigen. Und dann können wir sie oben speichern. Oder verlassen wir einfach den Bearbeitungsmodus.

Und wenn ich jetzt auf Hallo klicke, hören wir Folgendes. Hallo. Nun, und das ist meine eigene Stimme. So einfach ist das.