

Woord tegel toevoegen

Stapsgewijze instructies voor Woord tegel toevoegen in Express Me.

Bekijk de video, volg de stappen of open het volledige transcript voor een tekstversie van de instructies.



Scan om de video te bekijken

Stapsgewijze instructies

1

Bewerkingsmodus inschakelen

Ga naar de instellingen via het icoontje rechtsboven, schakel de **bewerkingsmodus** in en ga terug naar het hoofdscherm.

2

Een woordtegel toevoegen

Klik onderaan op **Tegel toevoegen** en kies de optie om een woordtegel toe te voegen (in plaats van een categorie).

3

De naam van de tegel invoeren

Typ de naam voor je nieuwe tegel (bijvoorbeeld "banaan") en bevestig deze. Kies ervoor om een foto te maken of een foto uit je galerij te selecteren.

4

Foto en positie instellen

Snijd de foto indien nodig bij, kies de gewenste positie voor de nieuwe tegel en bevestig je keuzes.

Opslaan en de tegel gebruiken

De app slaat de tegel automatisch op. Zodra de tegel is geladen, tik je erop om hem uit te laten spreken.

Volledig transcript

▼ Lees het volledige videotranscript

Ik ga je laten zien hoe je een woordtegel kunt toevoegen in de app.

Om te beginnen ga je naar de instellingen door op het icoontje rechtsboven te drukken en zet je de bewerkingsmodus aan. Ga vervolgens terug naar het hoofdscherm.

Nu zie je onderaan een knop "Tegel toevoegen" verschijnen. Druk hierop en kies voor de optie om een woordtegel toe te voegen (in plaats van een categorie).

Voer de naam in van de tegel die je wilt maken - in dit voorbeeld "banaan" - en bevestig de naam. Je krijgt nu de keuze om een foto te maken of een bestaande foto uit je galerij te selecteren.

Nadat je een foto hebt gemaakt of geselecteerd, kun je deze nog bijsnijden als dat nodig is. Kies vervolgens de gewenste positie voor je nieuwe tegel en bevestig je keuzes.

De app slaat nu alles op en zodra de nieuwe tegel is ingeladen, kun je hem gebruiken en uitspreken. Zo eenvoudig voeg je een persoonlijke woordtegel toe aan de app!