

Stem aanpassen

Stapsgewijze instructies voor Stem aanpassen in Express Me.

Bekijk de video, volg de stappen of open het volledige transcript voor een tekstversie van de instructies.



Scan om de video te bekijken

Stapsgewijze instructies

1

Open de instellingen

Klik op het **instellingen-icoontje** rechtsboven in de app. Het instellingenmenu opent met een lijst van beschikbare stemmen.

2

Kies een stem

Kies een stem uit de lijst, bijvoorbeeld een vrouwelijke of mannelijke stem. Tik erop om te luisteren — de stem stelt zichzelf voor zodat je kunt horen hoe deze klinkt.

3

Pas de nieuwe stem toe

Klik op **Terug** rechtsboven om terug te keren naar het hoofdscherm. Vanaf dat moment worden alle tegels uitgesproken in de stem die je hebt gekozen.

Volledig transcript

▼ Lees het volledige videotranscript

Ik ga je laten zien hoe je de stem kunt aanpassen die wordt gebruikt om de tegels uit te spreken in de app.

Om dit te doen, klik je op het instellingen-icoontje rechtsboven in de app. Je komt dan in het instellingenmenu waar je een lijst van beschikbare stemmen ziet.

Hier kun je kiezen uit verschillende stemmen, zoals vrouwelijke en mannelijke stemmen. Je kunt verschillende opties uitproberen door erop te klikken - de stem zal zichzelf voorstellen zodat je kunt horen hoe deze klinkt.

Zodra je tevreden bent met je keuze, klik je op 'terug' rechtsboven om terug te gaan naar het hoofdscherm. Vanaf dat moment worden alle tegels uitgesproken in de stem die je hebt gekozen.