

Ustaw własną mowę

Szczegółowe instrukcje ustawiania własnej mowy w Express Me.

Obejrzyj film, postępuj zgodnie z krokami lub otwórz pełną transkrypcję, aby przeczytać wersję tekstową instrukcji.



Zeskanuj, aby obejrzeć film

Instrukcje krok po kroku

1

Włącz tryb edycji

Włącz tryb edycji, klikając **Rozpocznij edycję**.

2

Otwórz menu kafelka

Kliknij trzy kropki na kafelku, który chcesz zmienić (np. „Cześć”), i wybierz **Nagraj własną mowę**.

3

Nagraj audio

Kliknij przycisk nagrywania, wypowiedz słowo lub frazę i zatrzymaj nagrywanie.

4

Odsłuchaj i przytnij nagranie

Odsłuchaj nagranie i w razie potrzeby przytnij je.

5

Potwierdź i zapisz

Kliknij **Potwierdź nagranie**, a następnie zapisz nagranie u góry lub wyjdź z trybu edycji.

Pełna transkrypcja

▼ Przeczytaj pełną transkrypcję filmu

Witam wszystkich, jestem Rick z ExpressMe.

Pokażę Wam, jak nagrać własną mowę, aby aplikacja mogła ją za Was odtwarzać.

Jeśli na przykład klikniemy tutaj na Cześć, usłyszymy następujące. Cześć. Ale chciałbym, żeby to był mój własny głos.

Cóż, w takim razie przechodzę do trybu edycji. Klikając rozpocznij edycję, możemy następnie kliknąć trzy kropki przy kafelku Cześć. I widzimy: nagraj własną mowę.

Gdy w to kliknę, pojawi się ten wyskakujący ekran. I możemy bardzo prosto rozpocząć nagrywanie. Zrobię to teraz. Cześć.

Następnie zatrzymuję nagrywanie i możemy odsłuchać nagranie. Cześć. Cóż, możemy je opcjonalnie trochę przyciąć, aby brzmiało lepiej. Cześć. No cóż, brzmi idealnie.

Następnie klikamy potwierdź nagranie. Możemy je zapisać u góry. Albo po prostu wyjdźmy z trybu edycji.

A teraz, gdy kliknę na Cześć, usłyszymy następujące. Cześć. No cóż, to mój własny głos. To takie proste.