

Cümle kutucuğu ayarlama

Express Me'de cümle kutucuğu ayarlama için adım adım talimatlar.

Videoyu izleyin, adımları izleyin veya talimatların metin sürümünü için transkriptin tamamını açın.



Video için tara

Adım adım talimatlar

1

Düzenleme moduna girin

Sağ üstteki düğmeye tıklayın ve **Düzenlemeyi başlat** seçeneğini onaylayın.

2

Kutucuk menüsünü açın

Değiştirmek istediğiniz kutucuğun üzerindeki üç noktaya tıklayın, örneğin **evet** kutucuğu.

3

Bir cümle yazın veya konuşma kaydedin

Menüden bir seçenek seçin. Örneğin "evet, gerçekten" gibi bir cümle yazın veya kendi konuşmanızı kaydedin.

4

Değişiklikleri kaydedin

Sağ üstteki **Kaydet** seçeneğine tıklayın.

5

Düzenleme modundan çıkın ve kutucuğu test edin

Düzenleme modundan çıkın ve seslendirilen cümleyi duymak için kutucuğa tıklayın.

Transkriptin tamamı

▼ Videonun tamamının transkriptini okuyun

Herkese merhaba, ben ExpressMe'den Rick.

Ve bugün size bir kutucuk için nasıl bir cümle ayarlayacağınızı göstereceğim; böylece kelime yerine bir cümle seslendirilir.

Örneğin şimdi evet kutucuğuna tıklarsam şunu duyarız. Ama burada başka bir şey de ayarlayabiliriz.

Hadi düzenleme moduna gidelim. Sağ üstte tıklayın, sonra tamam, düzenlemeyi başlat deyin. Ve sonra evet kutucuğunun üç noktasına tıklayabiliriz.

Birden çok seçenek olduğunu görüyoruz. Bir cümle doldurabilir veya konuşmayı kendimiz kaydedebiliriz. Şimdi örneğin evet, gerçekten diyorsunuz.

Ve sonra sağ üstten kolayca kaydedebiliriz. Düzenleme modundan çıktığımızda ve şimdi evet kutucuğuna tıkladığımızda şunu duyarız.

Bu elbette çok basit bir örnek, ama bununla her türlü şeyi yapabilirsiniz; örneğin kendi adınızın ya da daha uzun cümlelerin seslendirilmesi gibi.