

Налаштувати власне мовлення

Покрокові інструкції для налаштування власного мовлення в Express Me.

Перегляньте відео, виконайте кроки або відкрийте повний транскрипт, щоб прочитати текстову версію інструкцій.



Відскануйте, щоб переглянути відео

Покрокові інструкції

1

Увійдіть у режим редагування

Увійдіть у режим редагування, натиснувши **Почати редагування**.

2

Відкрийте меню плитки

Натисніть три крапки на плитці, яку хочете змінити (наприклад, «Привіт»), та оберіть **Записати власне мовлення**.

3

Запишіть аудіо

Натисніть кнопку запису, промовте слово або фразу та зупиніть запис.

4

Прослухайте та обріжте запис

Прослухайте запис і за потреби обріжте його.

5

Підтвердіть і збережіть

Натисніть **Підтвердити запис**, а потім збережіть запис угорі або вийдіть із режиму редагування.

Повний транскрипт

▼ Прочитати повний відеотранскрипт

Усім привіт, я Рік з ExpressMe.

Я покажу вам, як записати власне мовлення, щоб додаток озвучував його для вас.

Якщо ми, наприклад, натиснемо тут на «Привіт», ми почуємо наступне. Привіт. Але я хотів би зробити це своїм власним голосом.

Що ж, тоді переходжу в режим редагування. Натискаю «почати редагування», потім ми можемо натиснути на три крапки плитки «Привіт». І тоді бачимо: ага, «записати власне мовлення».

Коли я натискаю на це, з'являється ось таке вікно. І тоді ми можемо дуже просто почати запис. Зараз я це зроблю. Привіт.

Потім я зупиняю запис, і ми можемо його прослухати. Привіт. Далі ми можемо за потреби трохи обрізати його, щоб він звучав краще. Привіт. Звучить чудово.

Потім натискаємо «підтвердити запис». І можемо зберегти його угорі. Або просто вийдемо з режиму редагування.

І тепер, коли я натискаю на «Привіт», ми чуємо наступне. Привіт. Це мій власний голос. Ось так просто.